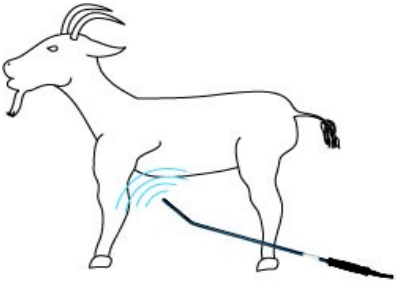

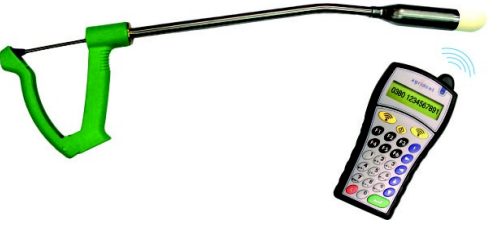
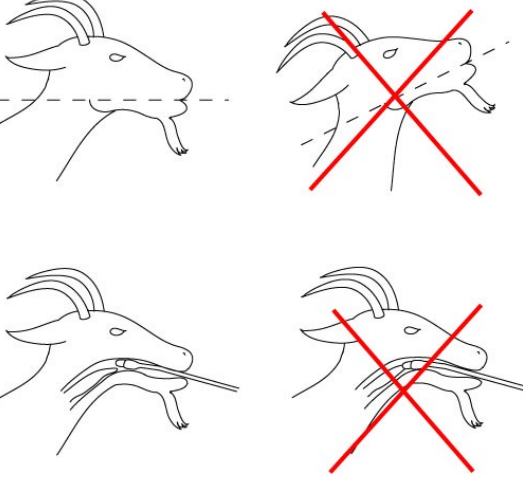


ISTRUZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL BOLO RUMINALE

<p>1 Verificare con il lettore l'eventuale presenza di un transponder nell'animale. Posizionare l'antenna sul lato sinistro nella parte craniale della regione epigastrica.</p>	
<p>2 Posizionare il bolo nel lanciaboli. Inserire il bolo nella pistola imbolatrice facendo entrare prima l'estremità che contiene il foro di inserimento del transponder</p>	
<p>3 Controllare con il lettore il corretto funzionamento del transponder contenuto nel bolo Il numero deve corrispondere a quello della marca auricolare.</p>	
<p>4 Introdurre il bolo nell'animale 1. L'animale deve stare fermo, in particolare non deve fare movimenti in avanti 2. Chiudere leggermente le narici per invitare l'apertura della bocca dell'animale 3. Posizionare il bolo, inserito nella pistola imbolatrice, appoggiandolo sulla faccia vestibolare laterale destra all'altezza dei molari 4. Tenere la testa con la parte ventrale in posizione parallela al terreno 5. non spingere eccessivamente il lanciaboli in posizione retroboccale perché ciò potrebbe procurare lesioni dei tessuti molli 6. Sganciare il bolo 7. Alzare leggermente la testa dell'animale e controllare la deglutizione</p>	
<p>5 Rileggere il bolo presente nel reticolo dell'animale e associare alla matricola i dati anagrafici del soggetto 1. Posizionare l'antenna sul lato sinistro nella parte craniale della regione epigastrica e rilevare la presenza del transponder 2. Liberare l'animale dal contenimento solo dopo essersi accertati che i dati raccolti siano stati registrati correttamente su palmare o brogliaccio di stalla.</p>	