

Procedura 3 A - Apposizione del transponder nell'animale

Numero d'ordine	Descrizione della fase procedurale	Note
1	Verificare con il lettore l'eventuale presenza di un transponder nell'animale	Posizionare l'antenna sul lato sinistro nella parte craniale delle regione epigastrica
2	Posizionare il bolo nella pistola imbolatrice	Inserire il bolo nella pistola imbolatrice facendo entrare prima l'estremità che contiene il foro di inserimento del transponder
3	Controllare con il lettore il corretto funzionamento del transponder contenuto nel bolo	Verificare il corretto funzionamento del transponder prima dell'apposizione nell'animale
4	Immettere il bolo nell'animale	<p>1) L'animale deve stare fermo, in particolare non deve fare movimenti in avanti</p> <p>2) Chiudere leggermente le narici per invitare l'apertura della bocca dell'animale</p> <p>3) Posizionare il bolo, inserito nella pistola imbolatrice, appoggiandolo sulla faccia vestibolare laterale destra all'altezza dei molari</p> <p>4) Tenere la testa con la parte ventrale in posizione parallela al terreno</p> <p>5) Non spingere eccessivamente il lanciaboli in posizione retroboccale perché ciò potrebbe procurare lesioni dei tessuti molli</p> <p>6) Sganciare il bolo</p> <p>5) Alzare leggermente la testa dell'animale e controllare la deglutizione</p>
5	Rileggere il bolo presente nel reticolo dell'animale e associare all'equivalenza transponder matricola i dati anagrafici del soggetto	<p>1) Posizionare l'antenna sul lato sinistro nella parte craniale delle regione epigastrica e rilevare la presenza del transponder</p> <p>2) Liberare l'animale dal contenimento solo dopo essersi accertati che i dati raccolti siano stati registrati correttamente sul palmare</p>